



v/ hjertelungeredning

Sluk for pumpen på standbyknappen, og start hjertelungeredning med det samme uden at lukke luften ud af cellerne.



Tryk på **standbyknappen** for at tænde for pumpen og påbegynde tilpasning til driftstilstanden **Normal**. Lad pumpen tilpasse sig til driftstilstanden **Normal** uden en person. Tryk på knappen igen for at slukke for pumpen uanset aktiv driftstilstand.



Aktivér og deaktivér tastaturlås. Tryk på knappen og hold den inde i tre (3) sekunder for at låse pumpens tastatur, hvis det er nødvendigt. Tryk på knappen og hold den inde i tre (3) sekunder igen for at låse tastaturet op.



Funktionen til bekræftelse af informationssignaler slår pumpens informationssignaler fra. Det hørbare signal bekræftes med et enkelt tryk, mens de visuelle signaler bekræftes ved at holde knappen inde i mindst tre (3) sekunder. Gør dig bekendt med de forskellige fejlsituationer, der er beskrevet i brugervejledningen. På bagsiden af quick guiden kan du finde et eksempel på fejlfinding.



Brug driftstilstanden **Normal** i alle liggende stillinger. Det er madrassens grundlæggende driftstilstand, som pumpen automatisk aktiverer ved opstart.



Driftstilstanden **Lydløs** kan vælges i en situation, hvor du vil minimere driften af pumpens styrecykluser og pumpefunktion, f.eks. om natten, når personen sover. Otte (8) timer efter valg af driftstilstanden **Lydløs** vender pumpen automatisk tilbage til driftstilstanden **Normal**.



Driftstilstanden **Supine** bruges kun til behandling af immobile mennesker i vandret stilling, der ligger på ryggen. I dette tilfælde tilpasser madrassystemet sig til den lavest mulige trykindstilling. **BEMÆRK: Sørg for, at personen ligger vandret på ryggen, når du vælger denne driftstilstand.**



Driftstilstanden **Siddende** er beregnet til mennesker i siddende stilling. Den bageste del af sengen hæves til en vinkel på mere end 30 grader. En time efter valg af denne driftstilstand afgives et informationssignal, som advarer personalet/personen om øget risiko for tryksår.



Driftstilstanden **Fast** gør madrassen hård under behandling. Pumpen genoptager automatisk driftstilstanden **Normal** efter 30 minutter, hvis der ikke foretages et andet valg. **BEMÆRK: Når madrassen gøres hård, mindskes dens trykreduktionskapacitet.**



LED'er fra venstre mod højre:

Strømkabel tilsluttet - Batteridrift - Bluetooth-forbindelse.

Eksempel på fejlfinding

– lækage i slangesystemet eller de indre celler.

1


Kontrollér luftslangerne

Se den aftagelige
hurtigvejledning

1

Pumpen afgiver et hørbart signal, og den tekst, der er vist her til venstre, vises på displayet. LED'erne i et indstillingsområde (som angivet med farver, der svarer til slangernes farver) lyser i orange nuancer.

2

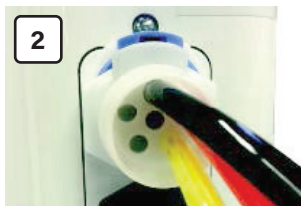

2

Kontrollér først, om Sixtube-tilslutningen, der er tilsluttet pumpen, er låst på plads, og om de påsatte slanger er placeret i holderne.



Optima7080
Optima8590
OptimaBario



OptimaCot
OptimaJuve

3



3

Åbn slangemuffen, og kontrollér, om slangerne mellem cellerne og pumpen er forbundet til tilslutningerne.

Kontrollér også, at farverne stemmer overens (f.eks. sort på sort).

4



4

Hvis du konstaterer, at der er løse slanger, skal du forbinde dem til hinanden efter behov.

Se brugervejledningen for at få mere detaljerede oplysninger efter behov.

Luk herefter slangemuffen.

5

3 sek.



5

Tryk på knappen til nulstilling af informationssignalet og hold den inde i tre (3) sekunder for at bekræfte signalet.

Kontrollér, at madrassystemet tilpasser sig korrekt til den valgte driftstilstand.

Hvis informationssignalet ikke ophører herefter, skal du kontakte Make Rehab.

Kontakt

Make Rehab A/S
Fuglebækvej 4J
2770 Kastrup

Åbningstider | Mandag-torsdag kl. 8-16 | Fredag kl. 8-15